


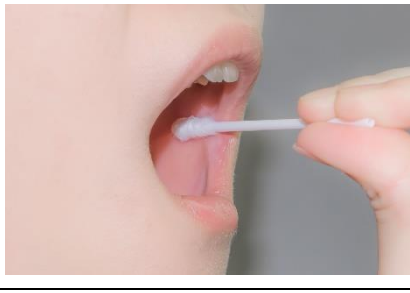

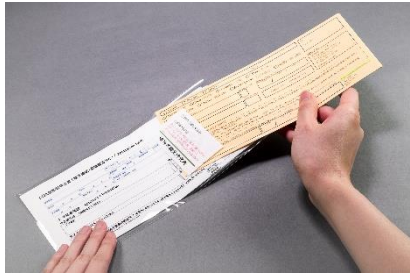


DNA試料採取方法

<p>STEP 1</p>		<p>お手元の「DNA試料採取セット」の内容をご確認いただき、万一不足などしてありましたら、至急ご連絡ください。</p> <p>※試料採取を行う1時間前に、水で口の中をゆすいで口腔内の食べカスを洗い流します。以降、採取を終えるまで、飲食や喫煙、歯磨きは控えて、口腔内を清潔に保ってください。</p>
<p>STEP 2</p>		<p>記入例（別紙）を参考に、必要書類の記入を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DNA型鑑定申込書 2. 綿棒封入用封筒 人数分
<p>STEP 3</p>		<p>綿棒のパッケージを、柄側（手で持つ側）より丁寧に開封します。</p> <p>綿棒が入っている紙パッケージは捨ててください。</p> <p>綿部分に息を吹きかけたり、手や物が触れないように注意してください。</p> <p>※送付した綿棒は、市販されているものとは異なります。</p> <p>採取時に脱落や紛失した場合は、再度送付いたしますのでご連絡下さい。場合によっては、有料となりますのでご注意ください。</p>
<p>STEP 4</p>		<p>綿棒を取り出し、口の中の内ほほ部分に上下左右に綿棒を回しながら1本につき15秒程度、ゆっくりとこすり付けます。</p> <p>※お一人様1袋：2本 採取してください。</p> <p>※DNA検査には「唾液」ではなく「口腔内の粘膜細胞」が必要です。</p> <p>十分な量を採取するため慎重に行ってください。</p> <p>採取量が不十分な場合、再採取して頂く場合もあります。</p>
<p>STEP 5</p>		<p>綿棒を口の中から出し、速やかに被検者の名前を記載した封筒に綿棒を直接入れ、指定本数分入れ終わったら封筒をシールで閉じます。</p> <p>※綿棒の封入間違いによる取り違いが発生しないよう、採取時に必ず封筒の名前をご確認ください。</p>
<p>STEP 6</p>		<p>申込書・お申し込み規約と被検者全員の綿棒入り封筒を、添付の透明ビニール袋などに入れてください。</p> <p>紛失防止の為、受取り確認が出来る方法（例：宅配便【受取り確認付き】・レターパックプラス・書留等）でご返送下さい。送付による郵便・配送事故などに関しましては、当社では一切の責任を負いません。</p>

※写真はイメージです。仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

※採取参照動画 <https://www.youtube.com/channel/UCERn0NJFVXXxwXS4QWovlDQ>